



Sterila engångslansetter

För effektiv och bekväm kapillär blodprovstagning

Praktiskt taget smärtfri

Elektropolerad trippelavfasad kanylspets garanterar en jämn och skarp finish för att ta bästa möjliga blodprov med maximal komfort. Dessutom mäter diametern på mylife™ Lancets endast 30 Gauge.



mylife™ Lancets
(150 × zoom)




Konkurrenters lansetter
(150 × zoom)

Exponerad kanylängd (ENL)


Kanylen är perfekt placerad för att garantera konsekvent kanylkoncentricitet och fri kanylängd.




Tillvägagångssätt med mylife™ Softlance

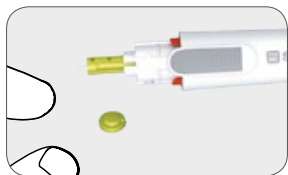

1. mylife™ Softlance blodprovstagare och mylife™ Lancet efter användning.

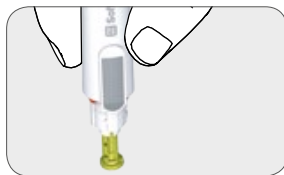

2. Oavsiktliga stickskador förhindras eftersom lansetten enkelt kan stickas in i huden.

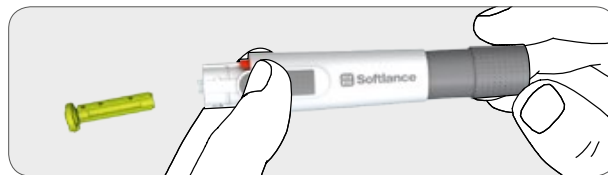


3. Enkel och hygienisk lansettutmatning utan att lansetten berörs. Släng den förbrukade lansetten i en lämpad punkterings-säker behållare eller en behållare för biologiskt riskavfall.




Tillvägagångssätt med mylife™ AutoLance™



1. mylife™ AutoLance™ med automatisk laddnings- och frisläppningsfunktion.

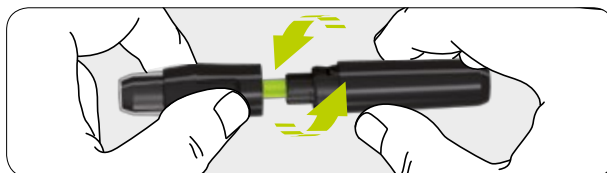

2. Praktiskt bajonettlås och stoppfunktion för enkelt byte av lansett.

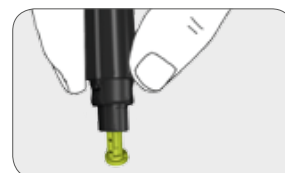

3. Oavsiktliga stickskador förhindras eftersom lansetten enkelt kan stickas in i huden. Säker kassering efter användning.




mylife™ Lancets högkvalitativa produktutbud

Lämplig för vuxna och barn


mylife™ Lancets standard

Lansetter av hög kvalitet för dagligt bruk som garanterar bästa blodflöde. Utformade för att göra blodprovtagningen enklare och bekvämare.

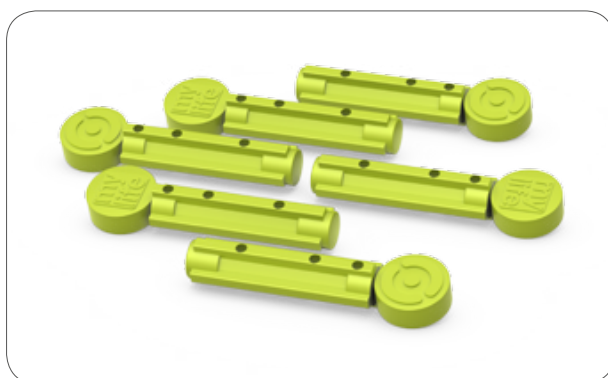

mylife™ Lancets multicolor

Samma funktion som mylife™ Lancets standard, men finns i sju olika färger.

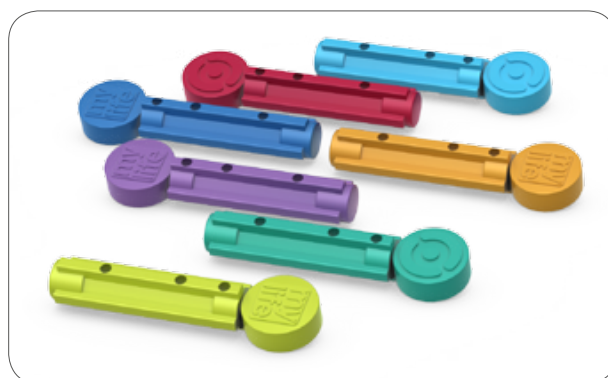

Håller steriliteten i 5 år

Steriliseringsdosen bestämd enligt ISO 11137-2:2012

Best.nr	Antal	Beskrivning	Gauge	Nåldiameter	Spetslängd	Höljets ytterdiameter
7101030	200 st.	mylife™ Lancets standard	30 Gauge	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm
7101031	200 st.	mylife™ Lancets multicolor	30 Gauge	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm