






Préparation

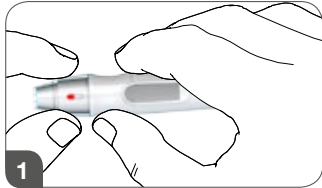


1 Penchez doucement l'autopiqueur.

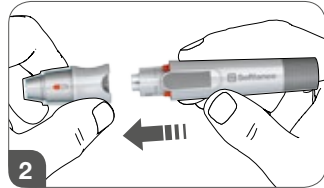


2 Retirez le capuchon.

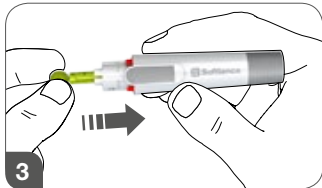


3 Insérez la lancette.

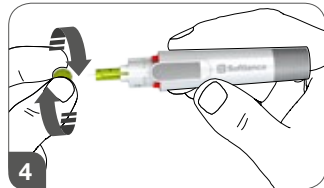


4 Dévissez le capuchon protecteur de la lancette.

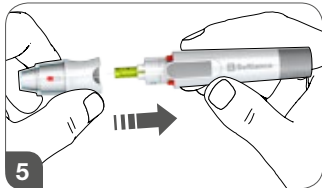


5 Remettez le capuchon.

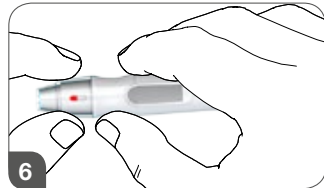

6 Déterminez la profondeur de piqûre.

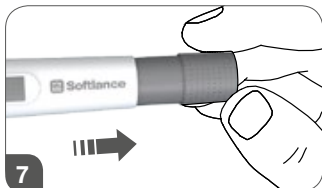

7 Tirez le piston et relâchez-le.

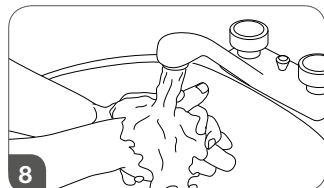


8 Lavez-vous et séchez-vous les mains.




Mesure de la glycémie




1 Retirez la bandelette de test du compartiment et fermez le compartiment.

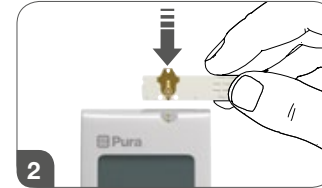

2 Insérez une bandelette de test. Le lecteur de glycémie démarre automatiquement.

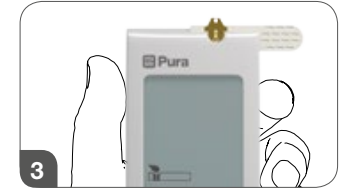


3 Le symbole de la bandelette de test clignote.

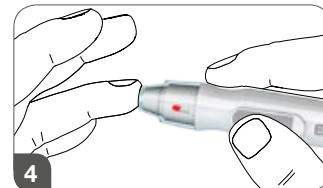


4 Piquez-vous le doigt avec la lancette en appuyant sur le bouton de l'autopiqueur.




5 Appliquez le sang sur la bandelette de test.

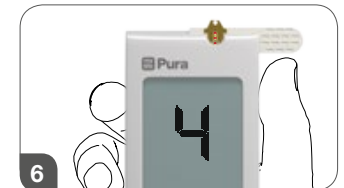


6 Le dispositif fait un compte à rebours en partant de cinq.

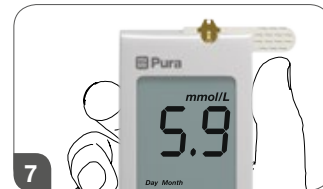

7 Lisez la mesure.

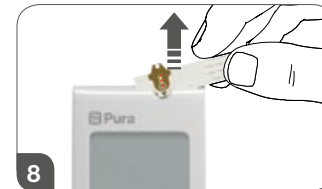

8 Retrait hygiénique de la bandelette de test sans contact avec le sang.

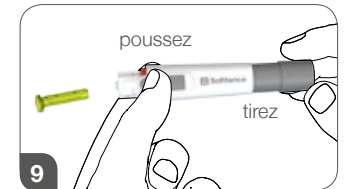

9 Retrait propre de la lancette sans contact avec le sang.

