



mylife™ SafetyLancets

Afnemen van capillair bloed met minder risico van letsel door de naald

Het innovatieve, gepatenteerde ontwerp maakt het afnemen van capillair bloed eenvoudig en veilig. De functie voor eenmalige ontgrendeling en een verzegelde beschermdop beschermen zowel de patiënt als de professionele zorgverlener tegen kruisbesmetting en letsel. mylife™ SafetyLancets zijn er in twee verschillende versies: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) en mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

Veiligheidsfuncties

- Aan het veiligheidszegel is te zien of de mylife™ SafetyLancet al eerder is gebruikt of niet
- De beschermdop houdt de lancet steriel en voorkomt contaminatie voor gebruik
- Na gebruik niet meer werkzaam, dankzij functie voor eenmalige ontgrendeling



mylife™ SafetyLancets
(28G/1,5 mm)


Comforteigenschappen

- Superieure naaldkwaliteit (drievoudig geslepen naaldpunt) voor optimaal vloeien van het bloed met een maximum aan comfort
- Laden of in elkaar zetten voor gebruik is niet nodig




mylife™ SafetyLancets Comfort
(30G/1,2 mm)


Hoe wordt de mylife™ SafetyLancet gebruikt

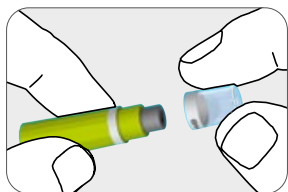


1 Draai eenvoudig de beschermdop van de mylife™ SafetyLancet en verwijder hem.

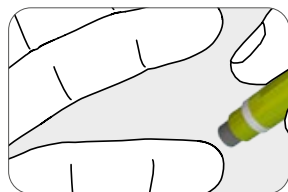

2 Zet de mylife™ SafetyLancet op de vinger.

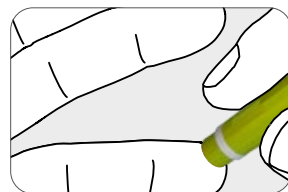

3 Druk het verhoogde gedeelte stevig tegen de gekozen plek om het lancetmechanisme te activeren.

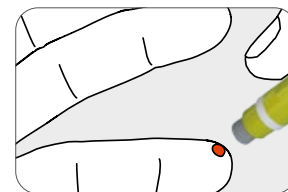

4 De naald wordt na gebruik direct teruggetrokken. Dankzij de functie voor eenmalige ontgrendeling, kan de mylife™ SafetyLancet niet onbedoeld opnieuw worden gebruikt.



mylife™ SafetyLancets

Steriele wegwerplancetten, voor het veilig en comfortabel afnemen van bloedmonsters

Verkrijgbaar in verpakkingen van 200 stuks, voorzien van een handig schuifdeksel



mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm)



mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm)

Ontworpen voor bloedglucosemonitoring en andere diagnostische onderzoeken in

- Diabetesklinieken
- Ziekenhuizen
- Thuiszorg
- Huisartspraktijken

Blijft 5 jaar steriel

- Gesteriliseerd middels bestraling
- De sterilisatiedosis is bepaald in overeenstemming met ISO 11137

| Naalddikte | Naalddiameter | Penetratiediepte | Beschrijving | Aantal | Ref. nr. |
|------------|---------------|------------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| 28G | 0,36 mm | 1,5 ± 0,2 mm | mylife™ SafetyLancets | 200 stuks | 7100031 |
| 30G | 0,30 mm | 1,2 ± 0,2 mm | mylife™ SafetyLancets Comfort | 200 stuks | 700001495 |