



Clickfine®
AutoProtect™



AUTO PROTECT



5 mm



8 mm

Les aiguilles mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pour stylos injecteurs sont testées conformément à la norme ISO 11608-2:2012; elles sont totalement fonctionnelles et sont plus sûres lorsqu'elles sont utilisées avec les stylos injecteurs mentionnés sur la boîte des aiguilles mylife™ Clickfine® AutoProtect™.

Certains stylos injecteurs ne sont pas disponibles dans tous les pays. En cas de question, veuillez vous adresser au fabricant du stylo injecteur. Toutes les marques sont des marques commerciales des fabricants mentionnés.

Suivez les instructions d'utilisation de votre stylo injecteur avant d'utiliser une aiguille pour stylo mylife™ Clickfine® AutoProtect™.

Convient à:

Stylos injecteurs diabète

AstraZeneca Ltd.



Byetta® Pen



SymlinPen®

Berlin Chemie AG



BerliPen® areo 2



BerliPen® PRECISION

Eli Lilly and Company



HumaPen® Luxura HD



HumaPen® SAVVIO



KwikPen® (Humalog®) U-100 + Mix 50/50™ + Mix 75/25™



KwikPen® Humalog U-200



KwikPen® Abasaglar

Novo Nordisk A/S



NovoPen® 4



NovoPen® 5



NovoPen® Junior



NovoPen Echo®



FlexPen®



FlexTouch®



Victoza®



NordiPen®



Saxenda® Pen



FlexTouch® Ryzodeg



FlexTouch® Xultophy



FlexTouch® Levemir



FlexTouch® Tresiba U-100



FlexTouch® Fiasp®

Sanofi



AllStar®



ClickStar®



Lyxumia® Pen



SoloStar®



JuniorStar®



Toujeo® SoloStar®



TactiPen®

**Tonghua Dongbao
Pharmaceutical Co., Ltd.**



Gansulin Pen

Ypsomed AG



ServoPen®



YpsoPen®

Autres stylos

Genentech, Inc.




Nutropin AQ Pen®




Plus de liberté. Plus de confiance. Avec mylife™.

YPSOMED
SELF-CARE SOLUTIONS


mylife™ Clickfine® AutoProtect™ Fonctionnement

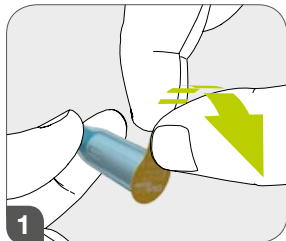


Retirez la pellicule de protection.

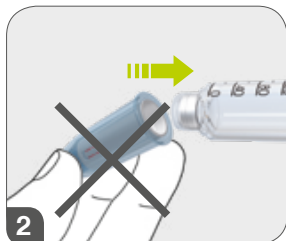


Ne pas tenir le dispositif incliné au moment de cliquer sur ce dernier pour l'enclencher.

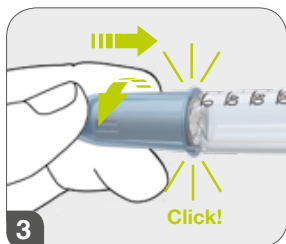


Cliquer (ou visser) le système mylife™ Clickfine® AutoProtect™ **obligatoirement dans l'axe du** stylo injecteur. Fixez l'aiguille en la vissant. L'aiguille vissée est bien fixée même s'il n'y a pas de butée nette en fin de vissage.

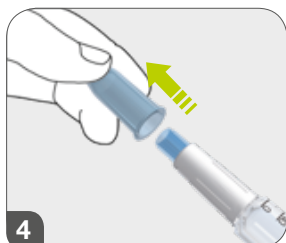


Retirez le capuchon protecteur. L'indication de verrouillage rouge n'est pas visible.

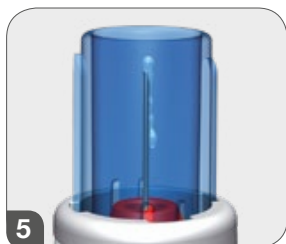


Avant de procéder à l'injection, vérifiez le bon débit du médicament en effectuant un test de fonctionnement conformément aux instructions d'utilisation de stylo injecteur. Réglez le dosage en suivant les instructions de votre médecin ou personnel de santé.

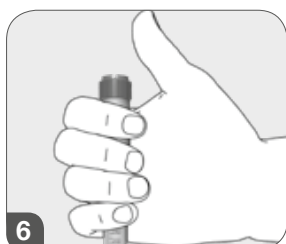


N'appuyez pas sur le bouton de dosage pendant l'injection.

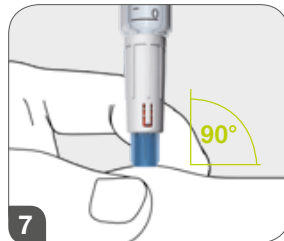


Placer le stylo injecteur en le maintenant verticalement, à un **angle de 90°**, sur le site d'injection choisi. Pour éviter une injection dans le muscle, il peut s'avérer nécessaire de former un pli cutané.

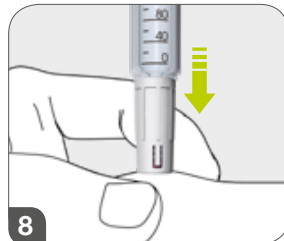


Appliquez une légère pression sur le stylo injecteur jusqu'à ce que la douille de protection bleue ne soit plus visible.

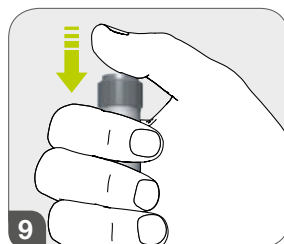

À présent, appuyez sur le bouton de dosage et administrez l'injection. Comptez lentement jusqu'à 10 avant de retirer l'aiguille de la peau.

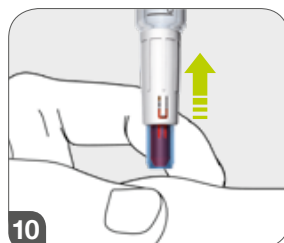

Retirez le stylo injecteur à 90 degrés (perpendiculaire à la peau) du site d'injection. Le verrouillage de la douille de protection bleue est automatique, et l'indication de verrouillage rouge apparaît.

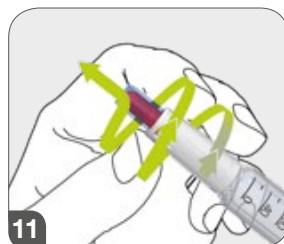

Dévissez l'aiguille mylife™ Clickfine® AutoProtect™ du stylo injecteur.



Éliminez l'aiguille en toute sécurité conformément à la réglementation locale en vigueur.