



Clickfine®  
AutoProtect™

# Kies voor preventie.



swissmade 

## mylife™ Clickfine® AutoProtect™ – de naald die alleen prikt als het moet.

- Innovatief blokkeermechanisme ter bescherming tegen prikaccidenten
- Voldoet aan de eisen van EU 2010/32 §4, art. 7<sup>1</sup>
- De pennaald is afgeschermd door een blauwe beschermdop voor meer vertrouwen
- Speciale oppervlaktebehandeling met siliconen, voor meer injectiecomfort
- Compatibel met alle belangrijke merken injectiepenen<sup>2</sup>, verkrijgbaar in lengten van 5 mm en 8 mm

**AUTO  PROTECT**



Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife™.

**YPSOMED**  
SELF-CARE SOLUTIONS



## Uw veiligheid is onze zorg

Met zijn innovatieve en gepatenteerde blokkeersysteem beperkt de mylife™ Clickfine® AutoProtect™ de kans op prikaccidenten tot een minimum, waarmee voldaan wordt aan de eisen van Richtlijn 2010/32/EU §4, art. 7<sup>1</sup> van de Raad van de Europese Unie. De mylife™ Clickfine® AutoProtect™ veiligheids-pennaald heeft de volgende kenmerken:

- Bevat een volledig geïntegreerd veiligheids-naaldmechanisme
- Blokkeert automatisch direct na injectie
- Rode blokkeermarkering geeft duidelijk aan dat de pen geblokkeerd is
- Zichtbare pennaald voor gemakkelijk primen
- De blokkering schernt de naald blijvend af, waardoor deze niet meer kan worden gebruikt

### 2010/32/EU §4, Art. 7 ✓

Om te kunnen voldoen aan paragraaf 4, artikel 7 van Richtlijn 2010/32/EU van 10 mei 2010 – preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche



In 2009 bekroond door het Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design




## Perfecte kwaliteit

Kies voor betrouwbaar comfort



Speciale oppervlaktebehandeling met siliconen voor een constant glijpatroon en soepele penetratie.

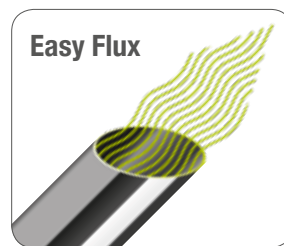

Medische naald van topkwaliteit met dunnewandtechnologie, voor een gemakkelijke, optimale doorstroming van het geneesmiddel door de grotere inwendige diameter.



## Hoe werkt het

Betrouwbaar veilig en eenvoudig



mylife™ Clickfine® AutoProtect™ met beschermdop.




Voor injectie: naald beschermd door beschermhuls.




Tijdens injectie: beschermhuls geeft naald vrij.




Na injectie: automatische blokkering en rode blokkeermarkering.

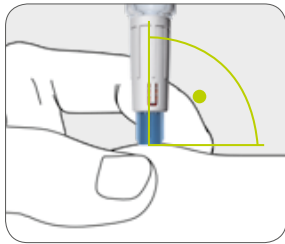


Plaats de injectiepen altijd verticaal in een hoek van 90° op de gewenste injectieplaats.

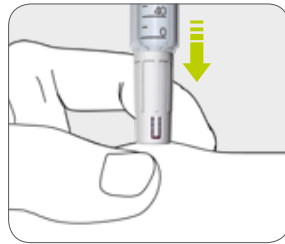

Oefen lichte druk op de injectiepen uit tot de blauwe beschermhuls niet meer zichtbaar is.

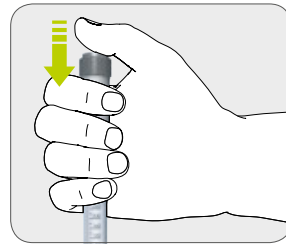

Druk nu de doseerknop in, injecteer langzaam. Tel langzaam tot 10 voor u de naald uit het weefsel trekt.

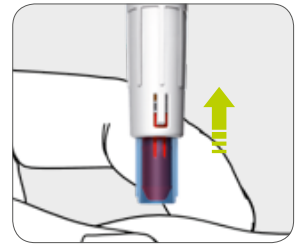

Verwijder de injectiepen. De blauwe beschermhuls vergedelt automatisch en de rode blokkeermarkering wordt zichtbaar.



Raadpleeg gebruiksaanwijzing



## Kies de passende naaldlengte voor uw patiënten

Kleurcodering voor het gemakkelijk herkennen van de verschillende naaldlengten

**De mylife™ Clickfine® AutoProtect™ -pennaald is verkrijgbaar in twee verschillende formaten: 5 mm en 8 mm.** De 5 mm-naald kan zonder huidplooi techniek worden gebruikt, waardoor het risico dat zorgverleners tijdens de injectie per ongeluk door de naald worden geprikt tot een minimum wordt beperkt.<sup>3</sup>



5 mm, 31G / 0,25 mm



8 mm, 29G / 0,33 mm



## Universal click®

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ past op alle belangrijke merken injectiepen

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennaalden zijn getest conform ISO 11608-2:2012; ze zijn volledig functioneel en veiliger als ze worden gebruikt in combinatie met de injectiepen die vermeld staan op de mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennaalddoos. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van de injectiepen. Volg de instructies voor uw injectiepen op voor u een mylife™ Clickfine® AutoProtect™-pennaald gebruikt.



<sup>1</sup> Richtlijn 2010/32/EU van de Raad – Preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche.

<sup>2</sup> Zie de lijst met compatibele penen op de mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennaalddoos of op de website [www.mylife-diabetescare.com](http://www.mylife-diabetescare.com).

<sup>3</sup> K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes.. Diabetes & Metabolism. 2012. 38, S2–S8, Supplement 1.



Diabetescare

Meer **vrijheid.**  
Meer **vertrouwen.**  
Met **mylife™.**



Infusiesystemen



Bloedglucose-  
meetsystemen



Therapie-  
management



Pennaalden

Onder het merk mylife™ Diabetescare biedt Ypsomed een uitgebreide portefeuille met producten en diensten aan voor mensen met diabetes. Daarmee krijgen gebruikers de mogelijkheid tot eenvoudige, discrete en betrouwbare zelfbehandeling. Met mylife™ Diabetescare wordt zelfbehandeling een vanzelfsprekendheid.

Ypsomed BV // Einsteinbaan 14 // 3439 NJ Nieuwegein //  
info@ypsomed.nl // [www.mylife-diabetescare.nl](http://www.mylife-diabetescare.nl) // Klantenservice: 0800-9776633

700017673/10193978-NL-nl/V01