



Clickfine®
AutoProtect™

Kies voor preventie.



swissmade 

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ – de naald die alleen prikt als het moet.

- Innovatief blokkeermechanisme ter bescherming tegen prikaccidenten
- Voldoet aan de eisen van EU 2010/32 §4, art. 7¹
- De pennaald is afgeschermd door een blauwe beschermdop voor meer vertrouwen
- Speciale oppervlaktebehandeling met siliconen, voor meer injectiecomfort
- Compatibel met alle belangrijke merken injectiepenen², verkrijgbaar in lengten van 5 mm en 8 mm



Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife™.

YPSOMED
SELFCARE SOLUTIONS



Uw veiligheid is onze zorg

Met zijn innovatieve en gepatenteerde blokkeersysteem beperkt de mylife™ Clickfine® AutoProtect™ de kans op prikaccidenten tot een minimum, waarmee voldaan wordt aan de eisen van Richtlijn 2010/32/EU §4, art. 7¹ van de Raad. De mylife™ Clickfine® AutoProtect™ veiligheids-pennaald heeft de volgende kenmerken:

- Bevat een volledig geïntegreerd veiligheids-naaldmechanisme
- Blokkeert automatisch direct na injectie
- Rode blokkeermarkering geeft duidelijk aan dat de pen geblokkeerd is
- Zichtbare pennaald voor gemakkelijk primen
- De blokkering schernt de naald blijvend af, waardoor deze niet meer kan worden gebruikt



2010/32/EU §4, Art. 7 ✓

Om te kunnen voldoen aan paragraaf 4, artikel 7 van Richtlijn 2010/32/EU van 10 mei 2010 – preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche

In 2009 bekroond door
het Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design



Perfecte kwaliteit

Kies voor betrouwbaar comfort



Speciale oppervlaktebehandeling met siliconen voor een constant glijpatroon en soepele penetratie.



Medische canule van topkwaliteit met dunnewandtechnologie, voor een gemakkelijke, optimale doorstroming van het geneesmiddel door de grotere inwendige diameter.



Hoe werkt het

Betrouwbaar veilig en eenvoudig



mylife™ Clickfine® AutoProtect™ met beschermcap.




Voor injectie: canule beschermd door beschermhuls.




Tijdens injectie: beschermhuls geeft naald vrij.




Na injectie: automatische blokkering en rode blokkeermarkering.

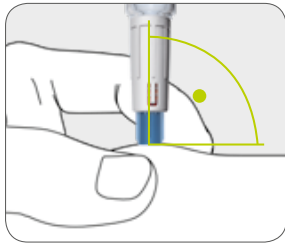


Plaats de injectiepen altijd verticaal en in een hoek van 90° op de gewenste injectieplaats.

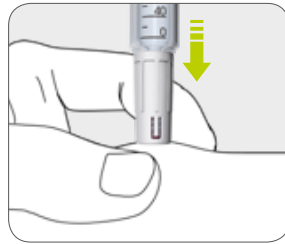

Oefen lichte druk op de injectiepen uit tot de blauwe beschermhuls niet meer zichtbaar is.

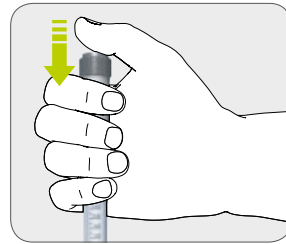

Druk nu de doseerknop in, injecteer langzaam. Tel langzaam tot 10 voor u de naald uit het weefsel trekt.

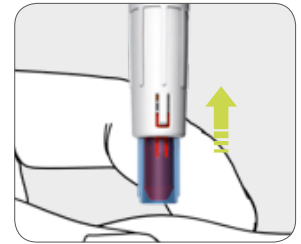

Verwijder de injectiepen. De blauwe beschermhuls vergendelt automatisch en de rode blokkeermarkering wordt zichtbaar.



Raadpleeg gebruiksaanwijzing



Kies de passende naaldlengte voor uw patiënten

Kleurcodering voor het gemakkelijk herkennen van de verschillende naaldlengten

De mylife™ Clickfine® AutoProtect™ -pennaald is verkrijgbaar in twee verschillende formaten: 5 mm en 8 mm. De 5 mm-naald kan zonder huidplooi techniek worden gebruikt, waardoor het risico dat zorgverleners tijdens de injectie per ongeluk door de naald worden geprikt tot een minimum wordt beperkt.³



5 mm, 31G / 0,25 mm



8 mm, 29G / 0,33 mm



Universal click®

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ past op alle belangrijke merken injectiepen

mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennaalden zijn getest conform ISO 11608-2:2012; ze zijn volledig functioneel en veiliger als ze worden gebruikt in combinatie met de injectiepen die vermeld staan op de mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennaalddoos. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant van de injectiepen. Volg de instructies voor uw injectiepen op voor u een mylife™ Clickfine® AutoProtect™-pennaald gebruikt.



¹ Richtlijn 2010/32/EU van de Raad – Preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche.

² Zie de lijst met compatibele penen op de mylife™ Clickfine® AutoProtect™ pennaalddoos of op de website www.mylife-diabetescare.com.

³ K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes.. Diabetes & Metabolism. 2012. 38, S2–S8, Supplement 1.

Meer **vrijheid.**
Meer **vertrouwen.**
Met **mylife™.**



Bloedglucose-
meetsystemen



Pen- en veiligheids-
pennaalden



Infusiesystemen



Accessoires
en service

mylife™ is een serie producten en diensten voor mensen met diabetes. Het biedt hen alles wat nodig is voor een eenvoudige en betrouwbare zelfbehandeling. Daardoor nemen zelfvertrouwen en de vrijheid om zelf hun leven in te richten toe.